

medical line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедических изделий

КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ

NLSS-156

WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Корсет ортопедический Orlett (из неопрена) с металлическими ребрами жесткости и дополнительными затяжками, арт. NLSS-156, применяется при необходимости фиксации поясничного отдела позвоночника (Th12-S1) средней степени, а также для стабилизации связочно-суставного аппарата, разгрузки суставов и связочного аппарата позвонков. Теплосберегающий эффект неопрена способствует усилению кровообращения мышц и улучшению впитывания лекарственных средств.
Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- болевой синдром при радикулитах, миозитах, травмах мышц;
- реабилитация после травм поясницы;
- обострения радикулита в холодное время года;
- профилактика травм и обострений заболеваний пояснично-крестцовой области при физических нагрузках в осенне-зимний период (в холодное время года).

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения корсета назначает лечащий врач. Для профилактики обострения заболеваний пояснично-крестцовой области рекомендованный режим: при нагрузках на поясницу. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- беременность;
- неврастимые грыжи брюшной стенки;
- диафрагмальные грыжи;
- синдром портальной гипертензии;
- первые трое суток острой травмы;
- острые гнойные воспалительные заболевания;
- опухолевые заболевания в области применения корсета;
- индивидуальная непереносимость материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- заболевания, при которых противопоказана гипертермия;
- заболевания кожи в области применения корсета;
- при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно прекратить использование корсета и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

КОНСТРУКЦИЯ

Корсет выполнен из неопрена. Неопрен – прочный упругий материал на каучуковой основе с выраженным теплосберегающим действием (сохраняет тепло, выделяемое телом человека, не оказывая дополнительного согревающего эффекта).

На рисунках отмечены следующие элементы конструкции:

1. Фиксирующий пояс корсета с 6 металлическими ребрами жесткости и с застежкой-липучкой велкро.
2. Две дополнительные затяжки с застежками велкро.
3. Специальная съемная подушка в области поясницы, позволяющая получить максимальное прилегание корсета к пояснице в случаях поясничного гиперлордоза (ярко выраженный изгиб поясницы вперед).



рис. 1.

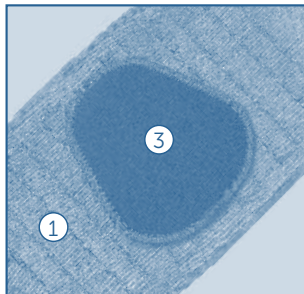



рис. 2.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Корсет рекомендуется надевать лежа на спине.

1. Застегнуть фиксирующий пояс с захватом на 2-3 см гребней подвздошных костей.
2. Затянуть и застегнуть дополнительные затяжки (ленты усиления) с застежками-липучками велкро.
3. При необходимости для лучшего прилегания корсета в поясничной области использовать съемную подушку.

ПРАВИЛА ПОДБОРА

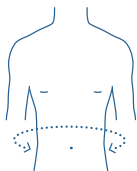

Для корректного подбора ортопедического корсета с металлическими ребрами жесткости и дополнительными затяжками необходимо измерить сантиметровой лентой (плотно, но не утягивая) окружность талии.

Согласно полученным результатам подобрать корсет Orlett по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	Окружность талии, см
S	до 82
M	82-95
L	95-108
XL	108-122
XXL	более 122

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить корсет. Важно, чтобы корсет был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено.

Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



СОСТАВ

55% полихлоропрен, 15% полиэстер, 10% полиамид, 10% полиуретан, 8% сталь, 2% поливинилхлорид.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Корсет утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции корсета. Не допускается эксплуатация поврежденного корсета.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. NLSS-156, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74412 (с 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

